

 <small>KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO</small>	TRANSPORT TKIVNIH VZORCEV	SOP 306-P- 006
		Izdaja: 2 Stran: 1 od 1
Laboratorij za citologijo in patologijo		

Čas sprejema
Od 8:00 do 16:00

Vzorec	Način odvzema	Posoda za transport	Čas transporta	Opombe
TKIVO DEL ORGANA ORGAN (fiksiran vzorec)	BIOPSIJA EKSCIZIJA RESEKTAT	STEKLENA ALI PLASTIČNA POSODA S FORMALINOM	ODLOŽEN	
TKIVO DEL ORGANA ORGAN (sveže tkivo)	BIOPSIJA EKSCIZIJA RESEKTAT	STEKLENA ALI PLASTIČNA POSODA	TAKOJ PO ODVZEMU	
TKIVNI KOŠČEK (imunofluorescenca)	BIOPSIJA EKSCIZIJA RESEKTAT	STEKLENA ALI PLASTIČNA POSODICA S HISTOKONOM	TAKOJ PO ODVZEMU	
TKIVNI KOŠČEK (zmrzli rez)	BIOPSIJA EKSCIZIJA RESEKTAT	STEKLENA ALI PLASTIČNA POSODA, PETRIJEVKA	TAKOJ PO ODVZEMU !!!	PREDHODNA NAJAVA VZORCA, NA NAPOTNICI OZNAČEN KOT NUJNO

Sprejem po 16:00 uri

Vzorec	Način odvzema	Posoda za transport	Čas transporta	Opombe
TKIVO DEL ORGANA ORGAN (rutinski pregled)	BIOPSIJA EKSCIZIJA RESEKTAT	STEKLENA ALI PLASTIČNA POSODA S FORMALINOM	POČAKA NA MESTU ODVZEMA DO NASLEDNJEGA DNE	

Sprejem vzorcev:
Laboratorij za patologijo 1 , sprejemni pult

Veljaven od: 13.05.2009	Pripravili: Tončka Urbanc	Pregledal: Izidor Kern	Odobril: Izidor Kern
Datoteka: D: kakovost/ aktivnosti/ navodila/ transport tkivnih vzorcev			
Dokumenti soobvladovani računalniško. Na papir natisnjeni dokumenti predstavljajo kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvorni dokument (elektronski ali pisni overjeni dokument), ki se nahaja pri koordinatorju vodenja kakovosti.			